



▶ **Kortfattad bruksanvisning**
Svenska

Denna bruksanvisning är ett komplement till den fullständiga bruksanvisningen.

Läs alltid den fullständiga versionen innan rullstolen tas i bruk.



ALLMÄNNA SÄKERHETSASPEKTER

- Följ underhållsanvisningarna. Håll stolen ren och testa reglage och bromsar med jämna mellanrum.
- Upptäcks en skada eller avsaknad av en detalj ska stolen tas ur bruk tills detta är åtgärdat.
- Använd **bara** godkända tillbehör.
- Rullstolen bör framföras och användas med omdöme för att undvika onödiga risksituationer.
- Rullstolen är inte avsedd att framföras av barn.
- Var observant på tipprisken bakåt, den ökar för rullstolar med utökad tilt och om väskor eller liknande hängs på ryggsätet.

- Brukare som är väldigt aktiva eller har ofrivilliga rörelsemönster kan tippa rullstolen om de greppar tag i fasta föremål. (t.ex. dörrkarmar, handtag) Ha god uppsikt över dessa brukare.
- Var uppmärksam på brukarens situation i stolen. Viss klämrisk finns p.g.a de olika inställningsmöjligheterna.
- Tänk på att brukaren inte alltid kan tala om att klämsituation uppstått.
- Vissa klädesplagg är ej lämpliga på brukaren då dessa kan fastna i hjulen. Var speciellt försiktig med halsdukar och liknande då dessa kan dras åt runt brukarens hals om de fastnar.
- Fäst ryggdynans stroppar runt flexiryggens rör för att undvika risk för tryck.
- Vid lyft: Läs instruktionen för lyfthjälpmidlet noga och var uppmärksam på brukarens armar och ben under lyftet.

BRUKARVIKT

Den maximalt tillåtna brukarvikten finns angiven på rullstolen enligt:



TIPPSKYDD

Rullstolen ska alltid vara utrustad med tipp-skydd.




Ha alltid tippskydden utdragna vid tipprisk bakåt.

JUSTERING



BROMSAR

Rullstolen kan vara utrustad med två olika bromstyper, färdbroms (a) för vårdaren samt däckbroms (b) för brukaren. De manövreras enligt pilarna.

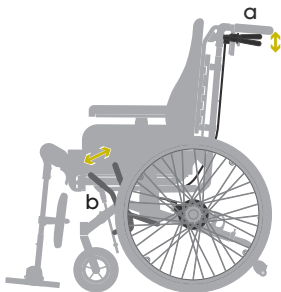

Parkeringsbroms manövreras enligt:
(Bromsa båda sidorna)

LÅSHYLSA



HJUL

TA LOSS HJUL


- Tryck in låsknappen (e) (sitter på undersidan för modell 16), lyft rullstolen en aning och ta loss hjulet.

MONTERA HJULEN

- För in hjulaxeln (c) i hylsan (d)
- Tryck in låsknappen (e) och tryck samtidigt in hjulet så de tre tapparna (f) passar i bromsskivans hål.
- Släpp låsknappen



Kontrollera att hjulet sitter fast.

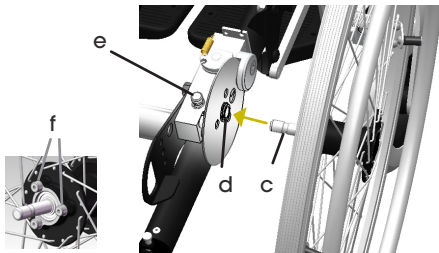

KÖRBYGEL

Höjden justeras i tre steg genom att trycka in det ena snäpplåset (g) och samtidigt föra körbygeln på samma sida uppåt eller nedåt. Håll körbygeln uppe/nere och tryck in det andra snäpplåset (h) så att justeringen kan slutföras. Se till att bromsvajrarna lätt glider med i rörelsen.




Kontrollera att båda snäpplåsen fjädrat ut i hålen och att bromsvajrarna löper fritt.




ARMSTÖD

BORTTAGNING / MONTERING

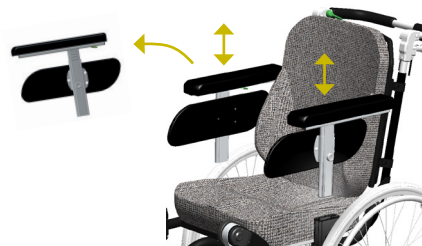

HÖJDINSTÄLLNING

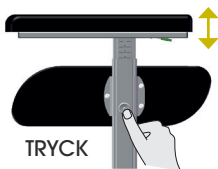


DJUPINSTÄLLNING




BENSTÖD

BORTTAGNING / MONTERING

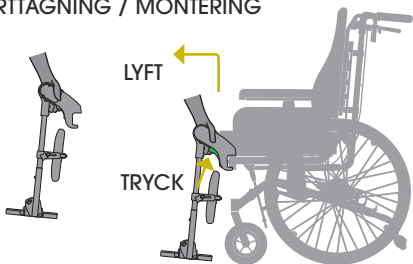

VINKLING & UTVRIDNING

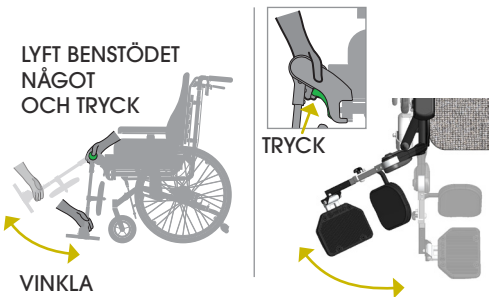

SKALOR & BRUKARKORT

Skalor och brukarkort (hänger på baksidan av ryggen) används för att brukarens sittställning ska bli i enlighet med förskrivarens rekommendationer.

SITSTILT



Avläses i grader på etiketten som sitter på vänster sida av sitsramen.

RYGGVINKEL

Avläses i grader på etiketten som sitter längst ner på vänster sida av ryggramen.

ARMSTÖD & BENSTÖD

Läget avläses på skalor enligt bilderna nedan:

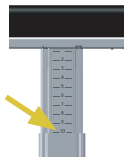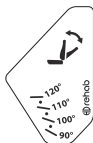

NAMN. Här står brukarens namn.

The diagram shows a rectangular card with rounded corners. At the top left is a stick figure icon. Below it is a horizontal line for a name. The main body of the card is divided into three sections, each with an icon and a horizontal line for a value. The first section has a chair icon with a curved arrow indicating back angle. The second section has a green chair icon with a curved arrow indicating tilt angle. The third section has a chair icon with a vertical double-headed arrow indicating armrest height. At the bottom left is the 'rehab' logo, and at the bottom right is an information icon (an 'i' in a circle).

RYGGVINKEL.
Här anges
rekommenderad
ryggvinkel.

TILTVINKEL.
Här anges
rekommenderad
tiltvinkel.

BENSTÖD. Här anges
rekommenderad
inställning för
benstöden.

ARMSTÖDSHÖJD.
Här anges
rekommenderad
inställning för
armstödet.


BAKSIDA. På baksidan av kortet kan
övriga kommentarer lämnas.

TRANSPORT I FORDON

- Transportera med stolen i färdriktningen.
- Använd 4-punkts bandsystem för stolen och 3-punkts säkerhetsbälte för brukaren.
- Huvudstöd ska användas.
- Ta av alla tillbehör, ex: bord, bålstöd mm.
- **OBS:** Spänn inte fast stolen för hårt.

Främre
fäste
runt
tvärröret

Bakre
fäste
genom
öglan


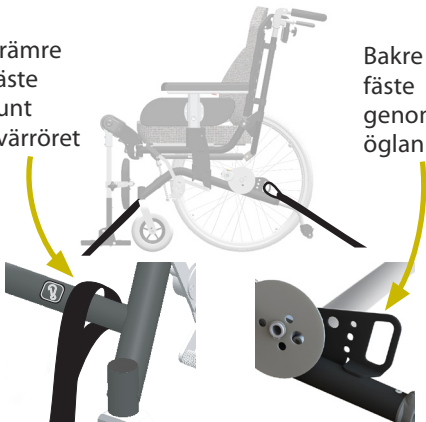


IHOPFÄLLNING AV RULLSTOLEN

- Tilta fram sitsen och ta av alla tillbehör, armstöden och dynorna.
- Håll i körbygeln och dra ut ryggfällnings sprinten (k). Gasfjädern lossnar och ryggstödet kan fällas framåt.

ÅTERSTÄLLNING EFTER IHOPFÄLLNING

- Fäll upp ryggstödet och dra ut sprinten (i).
- Passa in sprinten genom gasfjädersnål (j) och helt genom fästets båda plåtar (k).

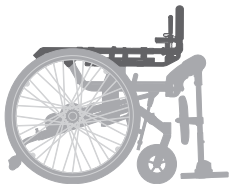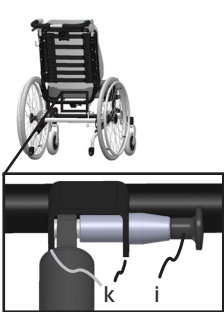

CHECKLISTA EFTER TRANSPORT:

- Kontrollera att ryggfällningssprinten (i) går helt igenom fästet (k).
- Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att tippskydden är monterade och i rätt läge.
- Testa de viktigaste funktionerna; broms, ryggvinkling och sitstilt.



Om sprinten inte är korrekt monterad kan fästet brytas sönder och brukaren tippas hastigt bakåt.



HD Rehab AB
Tryffelsslingan 4
181 57 Lidingö
SWEDEN



+46 - 8 - 767 04 80

info@hdrehab.se



www.hdrehab.se



Doc. nr. 95710
Kortfattad bruksanvisning
HD Balance
Rev D 2022-11-25



Läs den kompletta bruksanvisningen
för mer information (doc. nr. 95701).

DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL

För att säkerställa brukarens säkerhet bör en daglig funktionskontroll av de mest vitala delarna genomföras enligt nedan.

- Testa färdbröms
- Testa brukarbröms
- Kontrollera att sitstilt och ryggfällning fungerar.
- Kontrollera att hjul sitter fast och är hela.
- Kontrollera att dynor sitter där de ska och är hela och rena.
- Kontrollera att tippskydden sitter i lämpligt läge.
- Om stolen är utrustad med brukarkort så kontrollera att rullstolens inställningar överensstämmer med rekommendationerna på detta.