



## Bendelare till HD Balance

Bendelare finns i två varianter, standard (A) och framflyttad (B), och i två storlekar, stor och liten. Det som skiljer de två varianterna är bygelns utformning som ger olika läge på bendelaren (E, F). Bendelarkudden är mjukt polstrad runt en fast kärna.

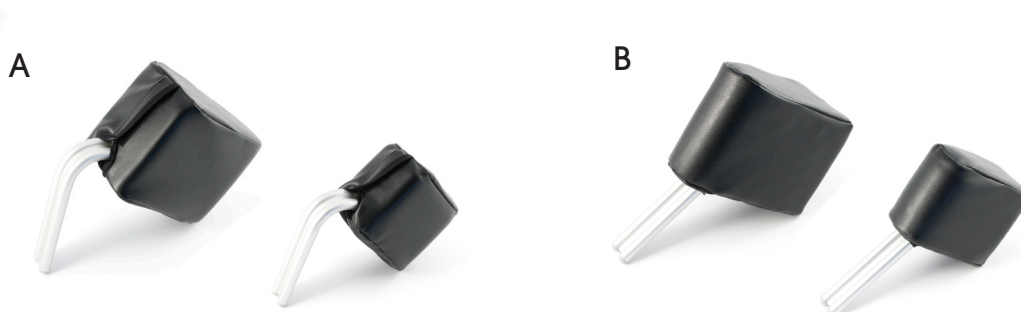

Bendelaren består av en kudde och en bygel (C). Den fästs på sittplattan med hjälp av ett bendelarfäste (D). Bendelaren tas enkelt bort från fästet vid förflyttning i och ur rullstolen.

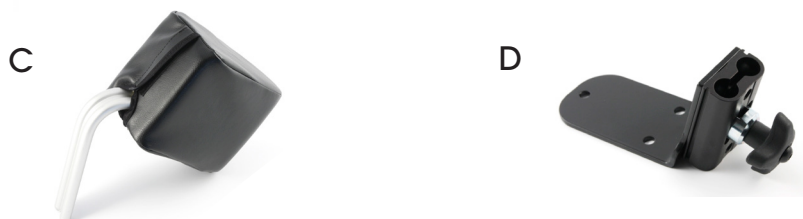

### Bendelare standard

Bendelare standard (E) används för att ge stöd åt eller separera brukarens ben. Denna är reglerbar i höjd och djup.



### Bendelare framflyttad


Framflyttad bendelare (F) används för att ge stöd åt eller separera brukarens ben längre fram. Detta kan vara en fördel, då adduktionskraften avtar längre fram och trycket mot bendelaren minskar. Risken för tryck mot genitala delar minskar också. Framflyttad bendelare är reglerbar i höjd.



## Mått

Tabell 1 - Mått [cm]

Modell	<b>a</b> bredd framtill	<b>b</b> bredd baktill	<b>c</b> höjd	<b>d</b> längd
Stor	6	10	12	16
Liten	6	8	10	13

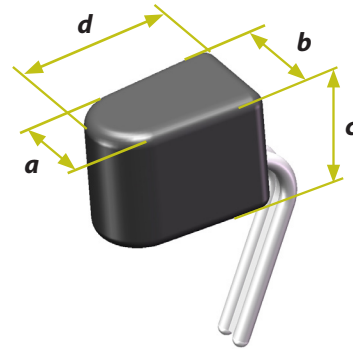

## Klädsel

Bendelarna är klädda med vinylmaterialet Soft som är avtorkbart.

## Tänk på

- Bendelarfästet bör tas bort om bendelaren inte längre ska användas regelbundet.
- Om brukaren glider fram mot bendelaren riskerar han/hon obehag eller skador!

## Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.