


Följande märkningar finns på HD Force i standardutförande. Artikelnummer och storlek för varje etikett anges i Tabell 1 på sida 4.

OBS

* Stjärnmarkerade rubriker indikerar att denna/dessa etiketter krävs för att rullstolens CE-märkning ska gälla. (För specialutföranden och tillbehör gäller detta bara om det aktuella utförandet/tillbehöret är monterat på rullstolen).

CE-MÄRKNING OCH IDENTIFIERING*



CE-etikett och ID-etikett ska sitta på framsidan av hjulramens främre tvärrör enligt Figur 1.

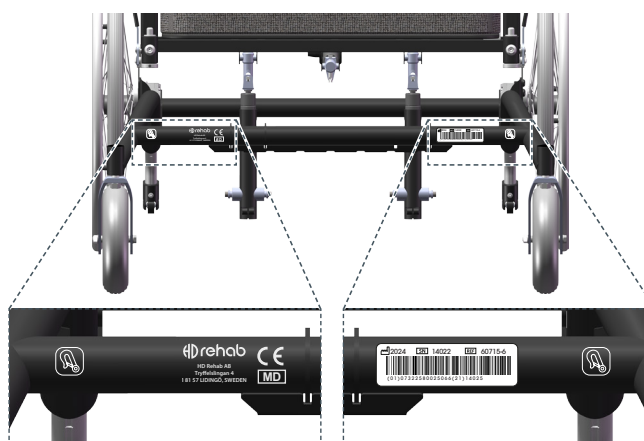

Figur 1

MODELLBETECKNING*


Modelletikett ska sitta på hjulramens bakre tvärrör enligt Figur 2.

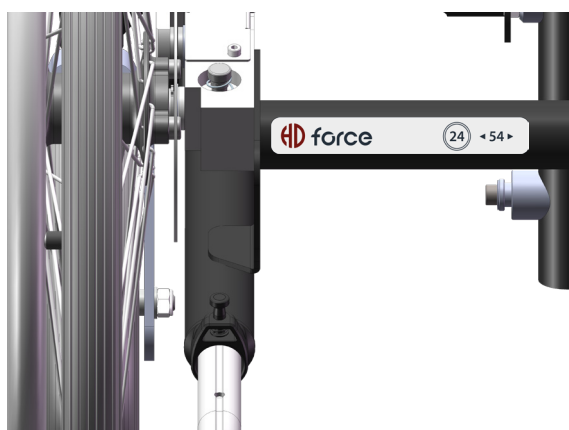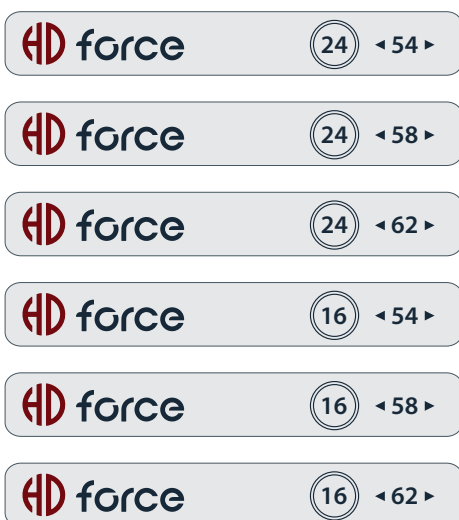

Figur 2

MAX BRUKARVIKT*


Brukarvikt-etikett ska sitta på sitsramens högra sidorör enligt Figur 3.

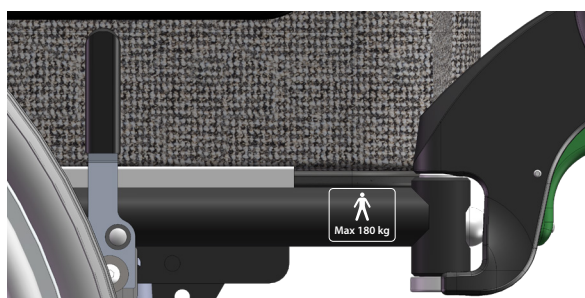

Figur 3

TRANSPORTFÄSTEN*

Fästpunkter är markerade på båda sidor av främre hjulram enligt Figur 4 och vid varje fäste bak enligt Figur 5.

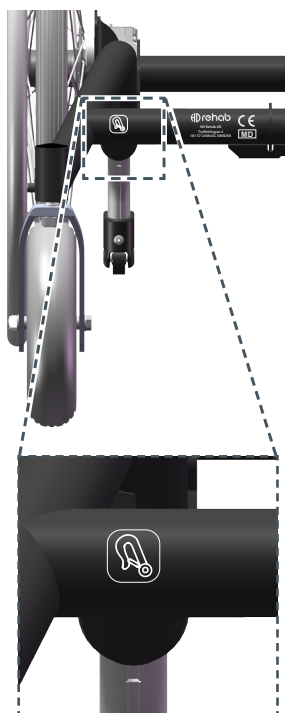

Figur 4




Figur 5

MARKERING AV PARKERINGSBROMS OCH TILTREGLAGE


Parkeringsbromsens etikett ska sitta på insidan av båda bromshandtagen enligt Figur 6 och 7.

Ryggfällningsetikett ska sitta på ovansidan av vänster körhandtagsknuten enligt Figur 6.

Sitstiltsetikett ska sitta på ovansidan av höger körhandtagsknut enligt Figur 7.

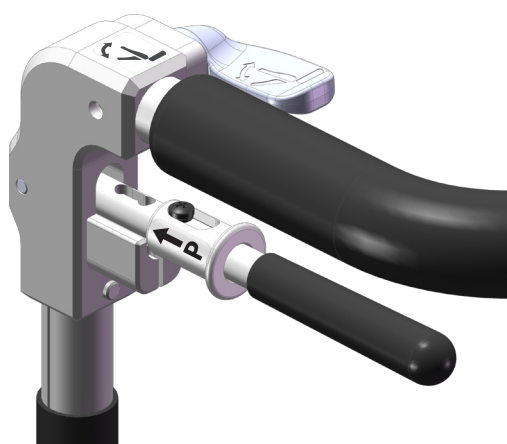



Figur 6

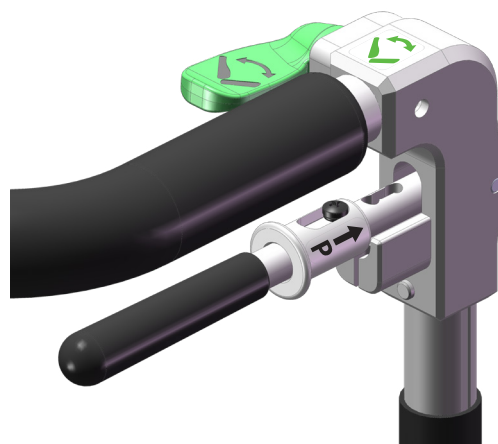

Figur 7

SKALA FÖR ARMSTÖDSHÖJD


Etikett som indikerar armstödet's höjd ska sitta på båda armstöden enligt Figur 8.

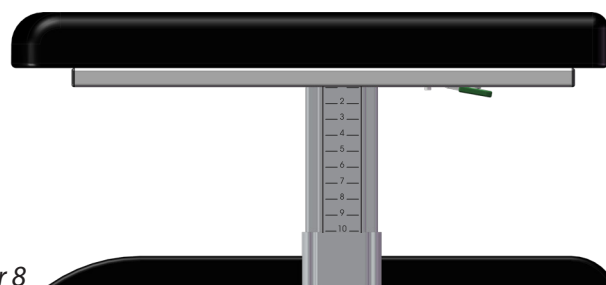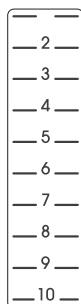

Figur 8

SKALA FÖR BENSTÖDSVINKEL

Etikett som indikerar benstöds vinkel ska sitta på båda benstöden enligt Figur 9.

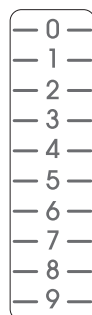

Figur 9

VARNINGSETIKETT TIPPSKYDD




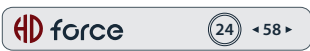
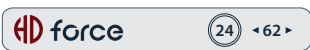
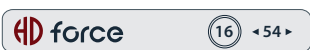
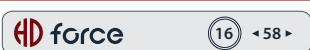
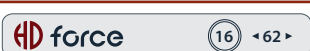








Varningsetikett ska sitta på båda tippskydden enligt Figur 10.



Figur 10

ARTIKELNUMMER OCH STORLEK

Tabell 1 - Etiketter artikelnummer och storlek

Etikett	Art.nr	Beskrivning	Bredd	Höjd
	87218	CE-etikett	56	25
	87219	ID-etikett	80	24
	87280-1	Modelletikett 24-54	140	20
	87280-2	Modelletikett 24-58	140	20
	87280-3	Modelletikett 24-62	140	20
	87280-4	Modelletikett 16-54	140	20
	87280-5	Modelletikett 16-58	140	20
	87280-6	Modelletikett 16-62	140	20
	87206-6	Brukarvikt Max 180 kg	29	24
	87215-5	Transportfästen	20	20
	87216-5	Parkeringsbroms	7	18
	87227	Sitstilt	14	14
	87228	Ryggfällning	14	14
	87211	Armstödsskala	24	95
	87212	Benstödsskala	18	55
	87226	Varningsetikett tippskydd	60	10