


Det finns två typer av benstöd; Benstöd fast (A) och Benstöd vinkelställbart (B). Benstöden kompletteras med önskat vadvstöd (Infoblad 97902) och/eller önskat fotstöd (Infoblad 97903).

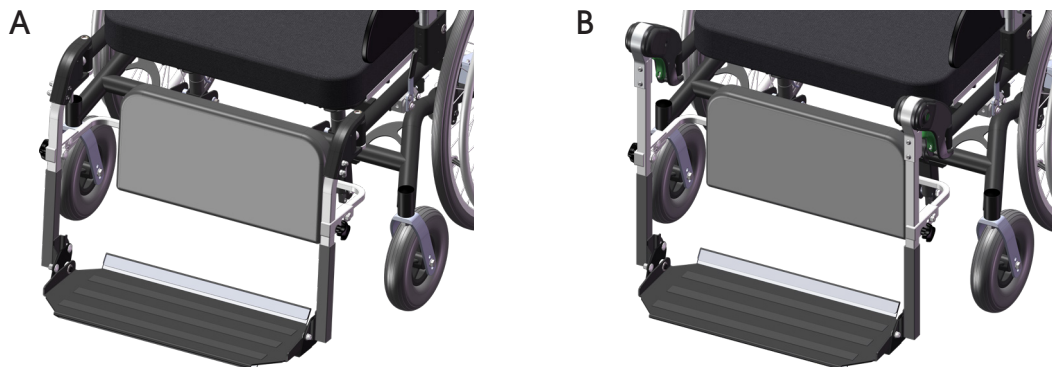

Vinkelfasta benstöd

Benstöd med fast vinkel finns i 90° eller 105°. Båda kan användas utan konflikt med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande. Fast vinkel 90° kan användas för att kontrollera sträckspasticitet och/eller uppnå ett mer aktivt sittande hos brukaren. Vid behov kan benstöd med andra önskade vinklar specialtillverkas.

Benstödet kan tas av/på genom att ta tag i benstödet och föra spaken framåt (C). Om rullstolen är försedd med separata vadvstöd/fotstöd kan benstödet även vinklas ut (D).



Vinkelställbara benstöd

Vinkelställbara benstöd används då brukaren har ett behov av lägesförändring av benen, t.ex. vid vila eller aktivitet. De kan vinklas mellan 90° och 180° (10 lägen) (E). En numrerad skala (F) underlättar rätt vinkelinställning av benstöden. Alla lägen kan användas utan konflikt med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande.

Vinkelställbara benstöd tas av och sätts på på samma sätt som vinkelfasta benstöd, men med ett annat reglage för frikoppling.



Frikopplingsreglage knäled

Frikopplingsreglage knäled (G) kan spärras i upplåst läge. Detta gör det möjligt att vinkelreglera benstöden från en sida när en hel fotplatta eller fotlåda används. Vinkelregleringen kan då utföras av endast en vårdare.



Mått benstöd

För att uppnå de funktionella måtten i tabellerna nedan kombineras olika längder på benstödsrör med olika längder på fotplattshållare. Se Infoblad Fotstöd (dok. nr. 97903).


Tabell 1 - Funktionell längd, fasta benstöd [cm]. Mäts från sittbrickans ovansida till fotplattans trampyta.

Modell	a min	a max
Standard	31	43



Tabell 2 - Funktionell längd, vinkelställbara benstöd [cm]. Mäts från sittbrickans ovansida till fotplattans trampyta.

Modell	b min	b max
Standard	29	43

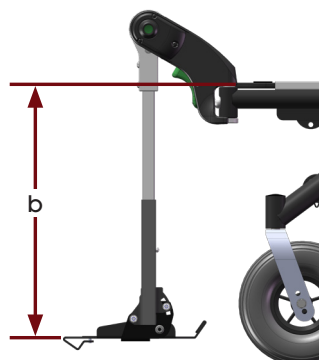

Tänk på

- Benstöd med helt fotstöd och helt vadstöd ökar benstödens stabilitet/hållbarhet och bör användas till brukare med till exempel kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd gärna vinkelfasta benstöd för maximal hållbarhet.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.