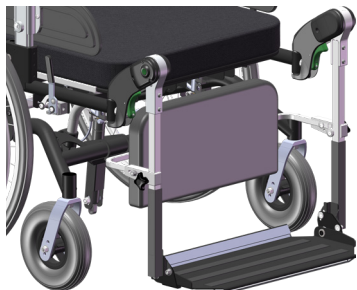


Det finns tre alternativa vadstöd; Vadstöd Helt (A), Vadstöd Delat (B) och Vadband (C).

A

B



C


Vadstöd Helt / Vadstöd Delat

Vadstöd Helt används vid behov av ökad benstödsstabilitet. Det kan även användas om en hel stödyta utan glipor önskas, t.ex. om brukaren har ofrivilliga benrörelser.

Vadstöd Delat användas t.ex. när behov finns av olika inställningar till brukarens två ben.

Vadstöd Helt och Vadstöd Delat består av vadplatta (D) och vadplattsfäste (E). Vadstöden är steglöst ställbara i höjd, längs med benstödsrören. Vadplattorna är ställbara i djup 3 cm samt steglöst i vinkel. De delade vadstöden är även steglöst ställbara i sidled 4,5 cm (F).

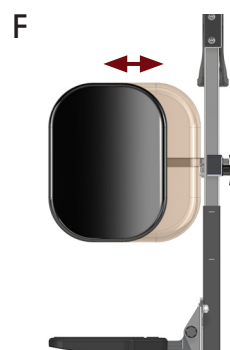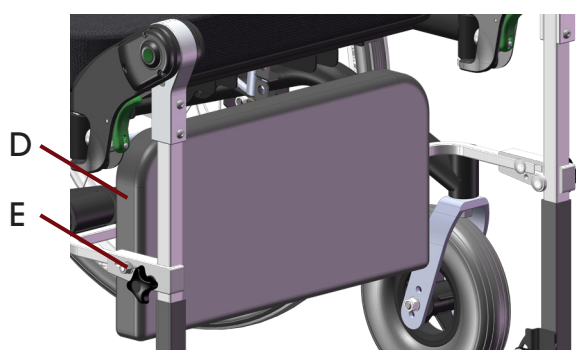

Vadband

Vadband (G) kan användas om ett enklare vadstöd önskas. Det monteras med kardborrband runt benstödsrören. Fästen (H) används för att säkra att rätt höjd bibehålls.


G

H



Mått vadstöd

Mått i centimeter.

Vadstöd Helt

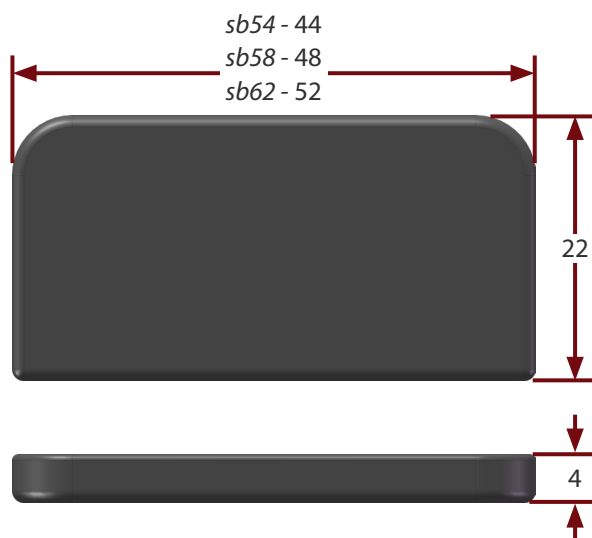

Vadstöd Delat

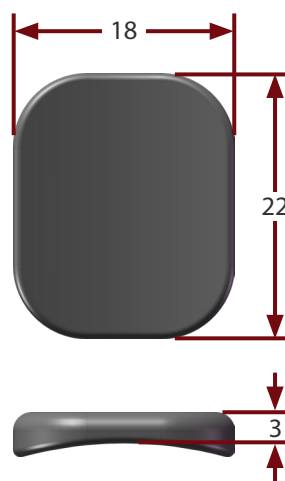

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.