

Drivhjul 24"

HD Force har som standard drivhjul i storlek 24" (A). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 24"-modellen används för brukare som helt eller delvis kan köra rullstolen själv. Denna modell går något lättare över hinder som t.ex. trottoarkanter.

DÄCK - EGENSKAPER

Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i Flexel. Flexel är en massiv gummislang som ligger inuti ett normalt gummidäck. Detta gör hjulet lättrollat när en tung brukare sitter i rullstolen.




Transporthjul 16"

HD Force 16 har som standard drivhjul i storlek 16" (B). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 16"-modellen är för brukare som inte kör själv. Denna modell möjliggör för vårdaren att komma närmare brukaren i vårdsituationen. Sidoflyttningar, t.ex. från säng till rullstol underlättas också med ett mindre drivhjul.


DÄCK - EGENSKAPER

Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i Flexel. Flexel är en massiv gummislang som ligger inuti ett normalt gummidäck. Detta gör hjulet lättrollat när en tung brukare sitter i rullstolen.

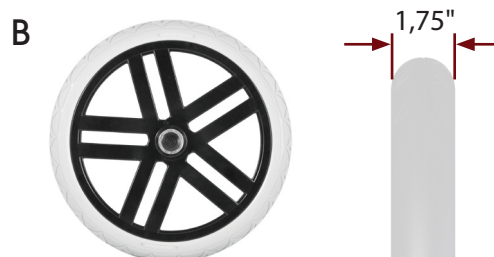


Länkhjul

Både HD Force modell 24 och 16 är utrustade med pump- och punkteringsfria länkhjul i storlek 200 x 50 mm (C). Hjulbanan är av Flexel.

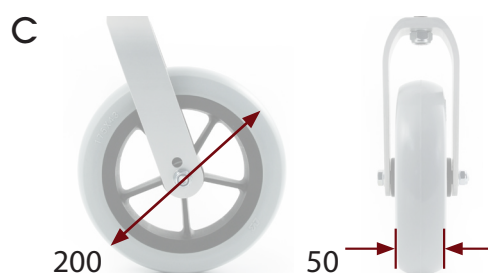

Drivringar

Drivringar till HD Force 24 finns i två material, rostfritt stål (D) som är slitstarkt eller soft grip (plastbeklätt) (E), om ett bättre grepp behövs.

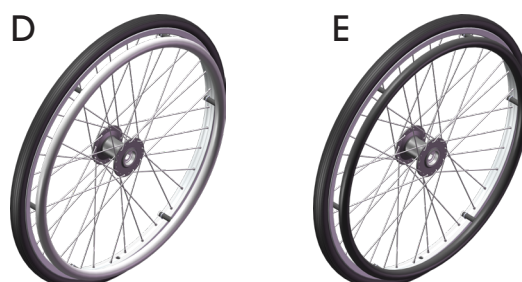


Ekerskydd

Ekerskydd finns att montera på drivhjul 24" (F). Avståndet mellan navet och ekerskyddet är ca 2,5 cm (G).

F



G

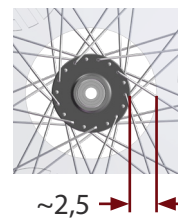

Tänk på

- Drivringarna får ej tas bort eftersom hjulkonstruktionen då försvagas.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.