

Vid positionering kan bålstöd användas för att stötta bålen och förbättra brukarens hållning/balans och förhindra att brukaren lutar åt något håll.

Bålstöd kan även användas som sidostöd till Huvudstöd Side+ eller Nackstöd Side+ vid behov av positionering av brukarens huvud. Detta infoblad innehåller ej fullständig information om detta.

Bedömning av brukarens behov och eventuella risker ska göras i varje enskilt fall. Komplettering av gällande bruksanvisning kan vara nödvändig/lämplig.

A



B



### Bålstöd Standard


Bålstöd Standard (A) används till brukare som lutar åt sidan. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att motverka att denna förvärras.

### Bålstöd Ställbart


Bålstöd Ställbart (B) används till brukare som lutar både åt sidan och snett framåt. Det kan också användas för att fördela trycket över en större yta av bålen. Bålstöd ställbart finns med kort eller lång kudde. Kort kudde används till små och mellanstora brukare och lång kudde används till mellanstora och stora brukare.

Bålstödkudden på Bålstöd Ställbart i kan ställas steglöst i vinkel (D) och djup (E) med hjälp av medföljande insexnycklar.

D

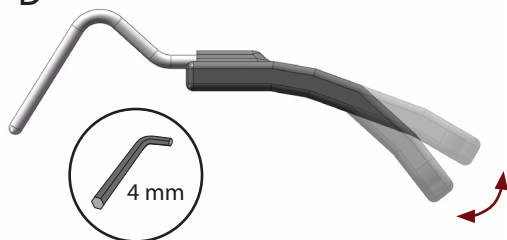

E

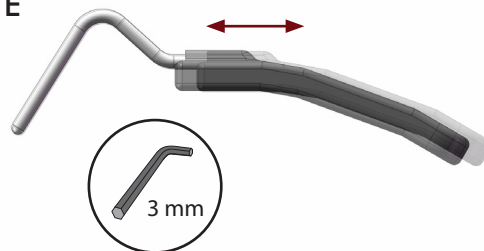


### Swing-modell

De tre olika typerna av bålstöd finns som Swing-modell (F), vilket tillåter att man med en knapptryckning lätt svänger bort bålstödkudden t.ex. i en förflyttningssituation (G). Swing-bålstöden kan även ställas i valfri vinkel mot brukarens kropp (H). Denna vinkel justeras med medföljande insexnyckel.


F



G

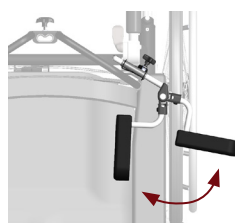


H

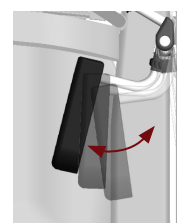

## Smal och bred position

Alla bålstöd går att ställa i bredd genom att reglera bygeln i bålstödsfästet. Dessutom finns de flesta bålstöd med bygel för smal och bred position (I). Bygel för smal position används till en brukare vars rygg är lika bred eller smalare än rullstolens rygg och bygel för bred position används till en brukare vars rygg är bredare än rullstolens rygg. Med bygeln för smal position kan kudden flyttas 5 cm längre in än med bygeln för bred position.

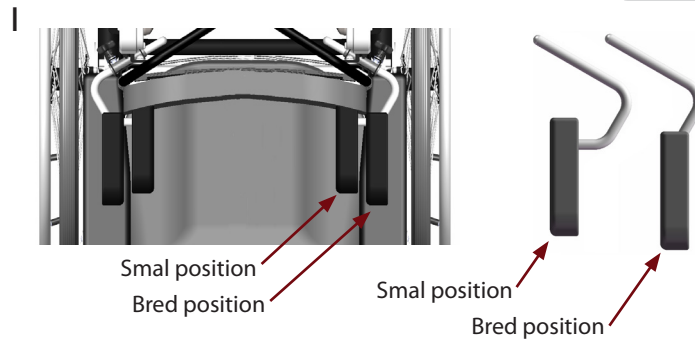

Tabell 1 - Utföranden

Modell	Smal position	Bred position
Standard	✓	✓
Ställbart kort	Finns endast en bygel	
Ställbart långt	Finns endast en bygel	
Swing - Standard	✓	✓
Swing - Ställbart kort	✓	✓
Swing - Ställbart långt	✓	✓

## Fästen


Fäste (J) till bålstöd beställs separat.



## Justering

Bålstöden regleras i höjd genom att bålstödsfästet monteras i olika hål i ryggstödet (K). Fästet kan sedan finjusteras steglöst 3 cm i höjd (L). Nyckel 10 mm används.


Bålstöden justeras i bredd genom att lossa ratten och föra bygeln inåt/utåt i fästet (M).

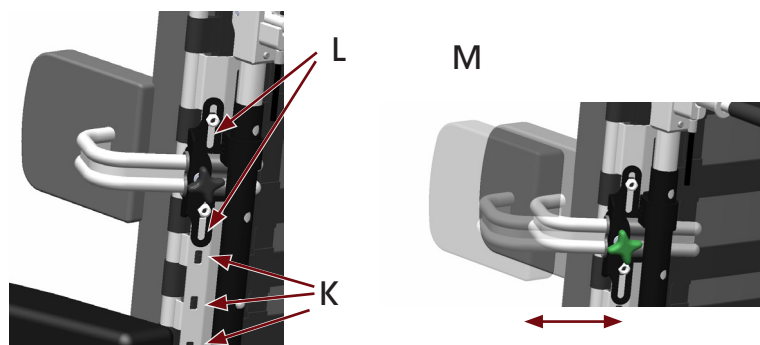

## Mått - bålstödskuddar

Tabell 2 - Mått - bålstödskuddar.

Modell	höjd [cm]	djup [cm]	tjocklek [cm]
Bålstöd, standard	13	14	2,5
Bålstöd Ställbart, kort	13	24	3,5
Bålstöd Ställbart, långt	13	28	3,5

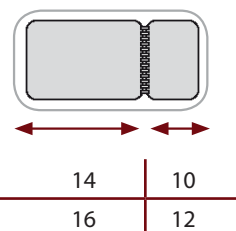

## Inställningsmått

Inställningsmått för bålstöden, enligt bild N, anges i tabell 3 och 4. Måtten är angivna i cm.

**Tabell 3 - Avstånd mellan bålstöden [cm]**

Sittbredd	Modell	smal position		bred position	
		<b>a</b> min	<b>a</b> max	<b>a</b> min	<b>a</b> max
54	Standard	41	51	51	60
	Ställbart	45	53	-	-
	Swing Standard	41	51	48	58
	Swing Ställbart	42	52	46	57
58	Standard	45	55	55	64
	Ställbart	49	57	-	-
	Swing Standard	45	55	52	62
	Swing Ställbart	46	56	50	61
62	Standard	49	59	59	68
	Ställbart	53	61	-	-
	Swing Standard	49	59	56	66
	Swing Ställbart	50	60	54	65

Där inget mått anges finns endast en bygel till modellen.

## Klädsel

Bålstöd Standard och Ställbart har klädsel i svart Trevira. De kan även beställas i svart avspritbar Dartex. Alla klädsel är avtagbara och tvättbara i 60°. Klädsel finns även att beställa separat.


## Tänk på

- Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få ett bra stöd och att bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada.
- Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla då området är tryckkänsligt.

## Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.

N

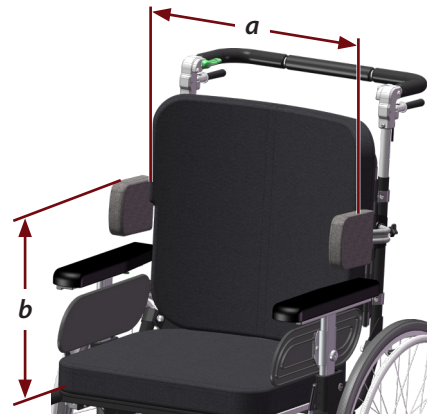

**Tabell 4 - Avstånd från sittplattan till bålstödets överkant [cm]. (Lägsta möjliga inställning begränsas av armstödet höjd.)**

Modell	<b>b</b> min (mätt med armstödet i lägsta möjliga läge)	<b>b</b> max (mätt med ryggen i högsta möjliga läge)
Standard	39	44
Ställbart	39	44