

Väskkrok (A) monteras runt körhandtagssidornas rör och används för att hänga lättare väskor eller dylikt på. För att inte hindra hjulens rörelser bör väskan placeras centrerat bakom ryggstödet med ett handtag på varje väskkrok.

**A**

### Tänk på

- Tipprisken ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas bakåt och väskkrokarna belastas.
- Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.
- Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att de är utdragna i aktivt läge.
- Det ligger på vårdaren/användarens ansvar att kontrollera tipprisken och se till att tippskydd används.

### Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.