

Vid behov av syrgasbehandling finns möjlighet att montera syrgashållare på HD Force.

Syrgashållaren (A) passar 2 - 2,5 l syrgastuber. Syrgastuber som används i dessa syrgashållare bör vara av typen LIV från AGA AB eller likvärdig.

### Fäste till syrgashållare

Syrgashållaren sätts på plats i fästet (B) som monteras på rullstolens ryggram. Syrgastuben kan därefter enkelt och säkert spännas fast i syrgashållaren med hjälp av kardborrband.

### Användning

Syrgashållaren med tub kan enkelt lossas från fästet på rullstolen och följa med brukaren vid en förflyttning. Hållarens fot kan vridas upp, vilket gör det möjligt att tillfälligt ställa ifrån sig hållaren på golvet.

### Mått

Syrgashållarens höjd är 26 cm.

Max diameter på flaskan är 12 cm.

### Tänk på

- Följ de instruktioner tillverkaren av syrgas tuber ger, när det gäller hantering av denna.
- Om syrgashållare med tub tillfälligt ställs på golvet, beakta tipprisken.
- Om syrgashållare monteras på rullstol medför detta en förhöjd tipprisk, speciellt i sitstiltat/ryggfällt läge.
- Om Flexiryggen slackas mycket var uppmärksam på syrgashållaren, så att den inte tar i brukarens rygg.
- Använd tippskydd.

### Artikelnummer

Artikelnummer för syrgashållare och fäste finns i Beställningsguiden, dok.nr. 97750.

